

110 * 254mm

“麥迪森”

芭弗莎林 緩衝生理食鹽水

“AIM” Buffer Saline

特性：

芭弗莎林緩衝生理食鹽水是專為隱形眼鏡配製之無菌、緩衝、等張溶液，不含任何防腐劑。

成分：

每ml中含有

Sodium Chloride.....7.1mg

Sodium Borate.....0.43mg

Boric Acid.....4.3mg

Distilled Water Added to Make.....1ml

用途：

隱形眼鏡之浸泡、沖洗、保存、中和。

使用方法：

- 1.用於藥水消毒法時，鏡片先用清潔液搓洗後，以本品將鏡片沖洗乾淨，然後浸泡於浸泡液中，戴用鏡片前再以本品將浸泡液沖淨後配戴。
- 2.用於加熱消毒法時，鏡片用清潔液搓洗後，以本品將鏡片沖淨，並浸泡於注滿本品之鏡片盒中，蓋緊盒蓋，然後放入加熱消毒器中消毒，俟鏡片盒冷卻後，取出鏡片使用。

注意事項：

- 1.使用時勿接觸瓶口，以免污染溶液。
- 2.請將本品保存於室溫下。
- 3.本品不可重覆使用。

包裝：

10ml塑膠瓶裝。

衛部醫器製字第004314號



藥商名稱：麥迪森醫藥股份有限公司
藥商地址：臺北市林森南路十號五樓
製造廠名稱：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠
製造廠地址：桃園市桃園區桃鶯路445-2號

5A42⑤