

單面尺寸：110\*254mm

單劑量包裝·一次使用一支

## “麥迪森”舒漾潤濕液

### “AIM”Fresh Wetting Solution

單劑量·不含防腐劑·不產生交互感染

“麥迪森”舒漾潤濕液為一次使用一支之單劑量包裝隱形眼鏡潤濕液，可免除多人多次使用一瓶而造成眼疾交互感染之危險。  
“麥迪森”舒漾潤濕液為單劑量使用包裝，故不含防腐劑，可避免防腐劑對眼睛之刺激。

#### 【成份】

每 mL 含：

Sodium chloride.....	6.5mg
Boric acid.....	5.0mg
Sodium borate.....	0.45mg
HPMC-606.....	5.0mg
E.D.T.A.(2Na).....	0.1mg
Polysorbate 80.....	0.0015mg
Distilled Water add to.....	1mL

#### 【適應症】

隱形眼鏡之濕潤。

#### 【用法用量】

隱形眼鏡專用，可去除隱形眼鏡上之微細異物並充分濕潤，以避免配戴隱形眼鏡之刺激感。

①旋轉上瓶蓋即可輕易開啟。

②視情況需要，取下隱形眼鏡適量滴於其上。

③為要易於押出藥液故每支均裝入稍微多量，每次使用後剩餘之藥液請務必丟棄。

·每支容器為醫藥品級純PE塑膠，無毒，可分解，可完全燃燒而不產生有毒氣體。

#### 【注意事項】

1. 本劑不含任何防腐劑，不致對眼睛造成刺激，但若有不適，仍請停止使用，並請教眼科醫師。
2. 本劑開啟瓶蓋後，請立即使用完。
3. 請勿以手接觸滴瓶口，以避免污染。
4. 請放置於陰涼處，以避免日光照射。
5. 請勿置於小孩可拿取處。

#### 【包裝】

0.5毫升×10支裝

0.5毫升×20支裝

0.5毫升×30支裝

0.5毫升×200支裝

衛部醫器製字第004818號



醫療器材商名稱：麥迪森醫藥股份有限公司  
醫療器材商地址：台北市中正區林森南路十號5樓  
製造業者名稱：麥迪森醫藥股份有限公司桃園廠  
製造業者地址：桃園市桃園區桃鶯路445-2號  
**ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO.,LTD.**  
No.445-2, Taoying Rd., Taoyuan Dist, Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

5A46 ⑤