

麥迪森玻尿酸舒潤液

AIM HA Rewetting Drops

衛部醫器製字第005543號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照使用。

單支裝·不含防腐劑
一次使用一支·不交互感染

【產品特點】

本產品含保濕滋潤分子Sodium Hyaluronate 0.15%能在角膜與鏡片間形成水分保護膜，滋潤保濕鏡片減少眼睛乾澀及不適感，含人體淚液中重要的電解質Potassium Chloride和Sodium Chloride，能與天然淚水完全融合。本產品無添加任何防腐劑。

【成分】

Each mL contains:

Sodium Hyaluronate.....	1.5mg
Potassium Chloride.....	3.0mg
Sodium Chloride.....	5.5mg
Sodium Phosphate Dibasic 12H ₂ O.....	4.0mg
Sodium Phosphate Monobasic 2H ₂ O.....	0.6mg
Distilled water Added to.....	1mL

【適用於】

本產品能有效濕潤各種隱形眼鏡(軟式隱形眼鏡、硬式隱形眼鏡)。有效舒緩因配戴隱形眼鏡所致之眼睛乾澀及不適。

【使用方法】

扭轉容器上端即可輕易開啟。

為提高配戴隱形眼鏡的舒適性，在配戴隱形眼鏡前，可滴1~2滴本產品至鏡片上。

如配戴隱形眼鏡，有不適情況出現時取下鏡片，直接將2至3滴舒潤液滴於鏡片上，然後戴上鏡片眨眼數次及等候片刻。

【禁忌症】

對本產品內任何成分過敏者，請勿使用本產品。

【注意事項】

1. 該產品只適合潤濕鏡片，不適於鏡片的儲存。
2. 請勿將滴瓶口接觸眼睛及其他表面，以防汙染。
3. 開封前，如發現瓶身破損或漏液、藥液混濁，請勿使用。
4. 本品開啟後請立即用完，不要儲藏。
5. 請在產品有效期限內使用本品。

6. 請儲存於陰涼處，避免陽光直射，並放置在兒童無法取得處。
7. 在極少數的情況下可能產生局部過敏，當發生過敏反應時，請停止使用。
8. 嚴格按照驗光師或眼科醫師指導配戴隱形眼鏡並定期到醫院檢查眼睛，以確保眼睛健康。

【包裝】

- 0.5mL × 5支塑膠瓶裝。
- 0.5mL × 15支塑膠瓶裝。
- 0.5mL × 20支塑膠瓶裝。
- 0.5mL × 30支塑膠瓶裝。
- 0.5mL × 200支塑膠瓶裝。



醫療器材商名稱：麥迪森醫藥股份有限公司
醫療器材商地址：台北市中正區林森南路十號5樓
製造業者名稱：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠
製造業者地址：桃園市桃園區桃鶯路445-2號
ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO.,LTD
No.445-2, Taoying Rd. Taoyuan Dist. Taoyuan City 330,Taiwan(R.O.C.)