

"麥迪森" 歐可潔多功能保養液

"AIM" Optic Comfort Solution

"麥迪森" 歐可潔多功能保養液適用軟式隱形眼鏡，包含彩色隱形眼鏡及矽水膠材質隱形眼鏡。具清潔、去蛋白、潤洗、消毒、保存、濕潤之多功能保養液。

衛部醫器製字第007659號

● 使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

【成分】

本品為無菌的等張溶液，內含Poloxamer、Sodium Chloride、Boric Acid、Sodium Borate、Edetate Disodium、Polyhexamethylene Biguanide、Polyquaternium、Sodium Hyaluronate。

【產品特點】

本產品擁有雙效消毒配方Polyhexamethylene Biguanide及Polyquaternium，保濕配方玻尿酸，可幫助鏡片消毒並保持濕潤。本產品也可單獨使用於潤洗鏡片。

【用途】

使用於隱形眼鏡清潔、消毒、沖洗、浸泡及保存等多項功能保養液，產品具雙效消毒系統及玻尿酸保濕，可適用軟式隱形眼鏡，包含彩色隱形眼鏡及矽水膠。

【用法說明】

為有效清潔消毒，務必雙手洗淨並完成以下步驟：



1 至少滴3滴保養液於鏡片正反面，以指腹輕柔搓洗鏡片20秒。



2 以保養液徹底沖洗鏡片內外兩側表面髒污。



3 將鏡片放入鏡片盒中並注滿保養液，於下次配戴前，至少已浸泡6個小時以完成消毒過程。每次浸泡請使用新鮮保養液。完成上述步驟後即可配戴。如鏡片上有任何殘留毛屑，請再配戴前使用本產品沖洗。

鏡片配戴前可儲存於緊閉的鏡盒中保存，浸泡於本產品，最長可存放30天。若保存超過30天，請在配戴前以新鮮的本產品進行清潔及消毒步驟。（日拋及週拋隱形眼鏡，請依其原廠建議使用）

鏡片盒清潔與管理

每次取出鏡片後都需清潔及晾乾鏡片盒，並經常更換鏡片盒。

【禁忌】

尚未有任何禁忌。若您對產品中之任何成分有過敏，請勿使用本產品。

【注意事項】

- 隱形眼鏡保養程序不確實所發生之問題，可能會導致角膜感染或潰瘍，造成視力不可回復性的損傷。務必遵照眼科醫師或驗光師的指示及說明書來正確使用與保養您的隱形眼鏡。正確的使用鏡片保養液及鏡片盒是非常重要的，鏡片盒請定期更換。
- 在取下隱形眼鏡前，請務必使用肥皂清潔手部。
- 請遵守規定浸泡6小時的浸泡消毒時間，以達成完全消毒之目的。
- 本產品請勿煮沸消毒，也請勿與其他的隱形眼鏡保養液混合使用。
- 請勿使用已過保存期限的本產品；若本產品出現混濁或變色，也請勿再繼續使用。
- 請將本產品放置於孩童無法觸及之處。
- 若是孩童使用本產品，請在監護人之監督下使用。
- 本產品為無菌，以過濾滅菌方式製備，若瓶身呈現破損，請勿使用。
- 具以下症狀之使用者，請於使用前諮詢眼科醫生：
 - a. 目前有眼睛過敏的症狀，如眼睛充血、搔癢、腫脹、發紅等。
 - b. 目前正在接受眼部治療者。
- 在使用完本保養液後，配戴隱形眼鏡時，若眼睛感到疼痛、刺痛、充血、分泌分泌物、產生異物感、搔癢感、視力模糊等異狀，請馬上取下隱形眼鏡並諮詢眼科醫師；若是持續使用，恐有眼睛感染、角膜潰爛等嚴重眼疾之虞。

【貯存】

室溫（15~30°C）貯存，不可放置於高溫度環境或冰箱中。

【包裝】

內附鏡片盒。

10 mL×8瓶、10 mL×16瓶、10 mL×24瓶、10 mL×32瓶、
15 mL×8瓶、15 mL×16瓶、15 mL×24瓶、15 mL×32瓶。



醫療器材商名稱：麥迪森醫藥股份有限公司
醫療器材商地址：台北市中正區林森南路十號5樓
製造業者名稱：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠
製造業者地址：桃園市桃園區桃鶯路445-2號
ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO.,LTD
No.445-2, Taoying Rd. Taoyuan Dist. Taoyuan City 330,Taiwan(R.O.C.)